


Cojín visco con memoria

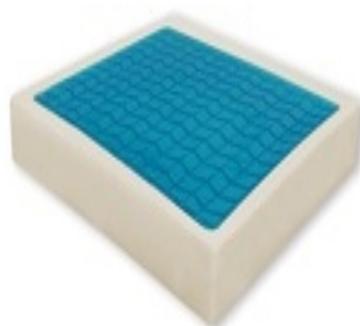

DRVISCO1 43X43 CM

DRVISCOGEL1 45X43 CM

Contiene 2 fundas elásticas, impermeables a líquidos y transpirables, con cremallera para poder lavarlas.

El cojín **DROMOS VISCO** está fabricado con una espuma viscoelástica que se adapta progresivamente a la forma del cuerpo mediante la temperatura corporal, volviendo a su posición inicial tras su uso, permitiendo la transpiración con un reparto del peso equilibrado.

Cojines fabricados con espuma de alta calidad, que se adapta a las necesidades del usuario, según norma ISO 13485, sin CFC, de acuerdo a la normativa europea REACH.

El uso del cojín en una silla de ruedas debe asegurar el equilibrio del nuevo centro de gravedad, que se produce con su utilización. El uso del cojín beneficia la posición, relaja la presión, reduciendo el riesgo de ésta sobre determinadas zonas del cuerpo.

Mantenga los cojines en una posición horizontal para su correcto mantenimiento. Procure almacenarlos en condiciones adecuadas de temperatura evitando situaciones extremas por debajo de los 0° C o por encima de los 40 °C.

Las fundas puede lavarlas a una temperatura no superior a 30 °C, usando jabones neutros. Si no usa el cojín durante un tiempo prolongado, comprueba antes de volver a usarlo su situación y en su caso vuelva a consultar con su proveedor.